

類別:医04 整形用品
 一般医療機器 医療用不織布(JMDNコード:34655000)
 医療用スポンジ(JMDNコード:13695000)

再使用禁止

水虫薬と使う水虫パッド(販売名:ZNC水虫パッド)

【警告】

固定テープの粘着剤に天然ゴムを使用しており、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがある。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談すること。

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 材質

本品(水虫パッド):ポリエチレン、セルロース等
 付属品(固定テープ):綿、天然ゴム、合成ゴム

2. 形状・構造

セルロースの不織布を挟んで、両面にポリエチレンからなるメッシュシートが付与されたシート材である。

また別途、付属品として本品の固定に用いる固定テープを付属する。

3. 原理

水虫パッドは水虫薬(本品には付属していない)塗布後の患部を保護する。不織布の両面に付与されたメッシュシートは、全面が微細孔を有するセル構造で、本品と創部との固着を防ぐ。過剰な浸出液等が生じる場合は不織布が浸出液を吸収することで、健常皮膚部での浸出液に起因する浸軟、カブレ等の皮膚障害を抑制する。また、本品は通気性に優れ、使用時の健常皮膚部の発汗や不感蒸泄によるムレを軽減する。

4. サイズバリエーション

製品番号	規格	入数(1袋)
AFA96	本品:20mm×40mm 付属品:8mm×60mm	各6枚

【使用目的又は効果】

本品は、薬物を塗布したり、液を除去するために用い、また創傷、外科切開部を処置するために用いる高分子材料である不織布から成る被覆・保護材である。

【使用方法等】

- 患部に市販の水虫薬を塗る。
- 患部に水虫パッドをあてる。なお、水虫パッド(本体)は個別包装されており、取出して使用のこと。また、水虫パッドに表裏はなく、どちらの面でも使用できる。
- 水虫パッドを付属品である固定テープで固定する。なお、固定テープは6枚綴りです。1枚ずつ分離して使用のこと。また、固定テープは水虫患部に直接貼り付けないこと。
- 交換時に皮膚が固定テープで汚れていた場合は、ぬるま湯等で洗い流すこと。

【使用上の注意】

- 水虫薬は別途購入のこと。本品には含まれていない。
- 本品は爪水虫には使用できない。
- 水虫薬を塗布する際、固定テープやその貼り付け部分に付着しないようにすること。固定テープの粘着力が損なわれる可能性がある。
- 水虫薬の使用は、その取扱説明書に従うこと。
- 患部に本品が原因と推定されるカブレや異常が起きた場合には直ちに使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- 水虫パッドは水虫薬の塗布ごとに新しいものに交換し、再使用しないこと。

【保管方法及び使用期間等】

保管方法

直射日光を避け、なるべく湿気の少ない、小児の手の届かないところに保管すること。

有効期限

使用期限:製品包装に記載(自己認証による)


【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社瑞光メディカル
 〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上四丁目3番50号
 電話:072-653-8877

【使用方法の補足】

- 水虫パッド(本体)は個別包装されており、取り出して使用してください。また、水虫パッドに表裏はなく、どちらの面でも使用できます。
- 固定テープも6枚綴りです。1枚ずつ分離して使用してください。また、固定テープは水虫患部に直接貼り付けないでください。
- 交換時に皮膚が固定テープで汚れていた場合は、ぬるま湯等で洗い流してください。
- パッケージの使用方法的イラストもご参照の上、ご使用ください。

水虫パッド(本体)

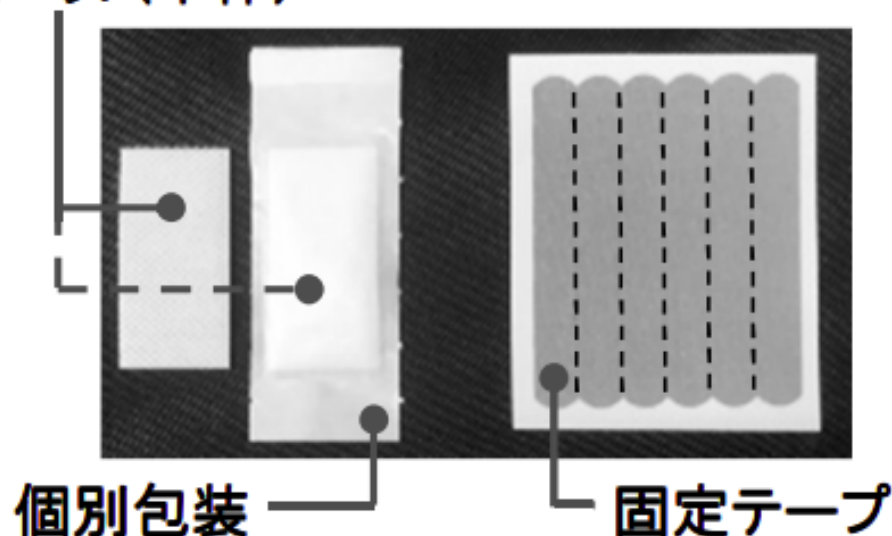

【警告】

- 固定テープの粘着剤に天然ゴムを使用しており、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。