

類別:医04 整形用品
一般医療機器 一般的名称:医療用不織布(34655000)、綿状パッド(32572000)**

プラスモイストHSP

再使用禁止

【警告】

明らかな臨床的創感染を有する患者には慎重に使用すること。
(感染を悪化させる恐れがある。臨床的感染を有する患者であっても感染に対する薬剤治療や全身・局所管理をしながら本品を併用することが有益と医師が判断する場合には、局所の観察を十分に行い、慎重に使用すること。)

【禁忌・禁止】

再使用禁止
本品の成分に対してアレルギーを有する患者には使用しないこと

【形状・構造及び原理等】

1. 材質
アルギン酸カルシウム、ポリエチレン等
2. 形状・構造
本品はアルギン酸カルシウムからなる不織布〔白色〕(創部接触面)の片面を、ポリエチレンからなる防漏シート〔肌色〕で覆った2層構造のシート材である。

《製品外観》



〔表面～側面(創部接触面)〕

3. 原理
アルギン酸カルシウムからなる不織布は、創部を被覆して保護すると共に、血液、浸出液などの体液を吸収してゲル化する。吸収した体液はフィルムからなる防漏シートにより漏出させない。

*4. サイズバリエーション

製品番号	規格	入数
HSA7I	80mm×300mm	1

【使用目的又は効果】

本品は主としてアルギン酸カルシウム不織布からなり、創傷や外科切開部における血液や浸出液を吸収し、保護することを目的とする。

【使用方法等】

1. 創部を生理食塩液や水道水等で十分に洗浄する。汚れや異物を取り除くこと。また、消毒液を用いた場合は消毒液が残らないように生理食塩液や水道水等でよく洗い流す。(本品交換時にも必ずこの処置を行うこと。)
2. 本品を包装袋から取り出し、周囲の健常皮膚も十分に被覆できるサイズ、形状にはさみなどで適宜カットする。
3. 本品の不織布〔白色〕側を創部にあてがい、密着させる。

【注意】

1. 消毒薬や脱色剤、有機溶剤との併用はしないこと。また、原則、軟膏、クリーム、オイル等の薬剤と併用しないこと。
2. 本品が創部からずれないようにサージカルテープ、フィルムドレッシング、包帯、ネット等を用い、本品を健常皮膚部で固定する。

5. 交換時は、創部の周囲からゲル化していない本品を、創部に負担がかからないよう端からゆっくりと除去する。除去が困難な場合には、本品と創部との接触面に生理食塩液や水道水等をシリンジ等で流すか、又は、生理食塩液や水道水等をしみこませたガーゼ等でぬらし、少しずつはがすこと。創部に付着したゲル化した本品は、生理食塩液や水道水等で、綺麗に洗い流すこと。
6. 通常、浸出液が本品周囲からもれ出すまで、連続で使用できるが、早めに交換すること。(少なくとも1日1回の交換を推奨する。)
7. 出血が止まった後は、本品の使用を中止し、“プラスモイストV”等の被覆材を使用することを推奨する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 本品の使用においては、感染の兆候(疼痛、発赤、腫れ、発熱)に十分に注意し、臨床的感染が認められた場合には直ちに使用を中止し、適切な治療を行うこと。なお、患者の全身状態の悪化、全身管理の不足等によっても創部に感染症状が現れることがある。
2. 糖尿病や血行障害の治療を受けている患者には、本品を使用することが有益と医師が判断する場合に限り、局所の観察を十分に行い、慎重に使用すること。
3. 次のような創の場合は適切な処置を行い、慎重に使用すること。
 - ・ガラス・木片・砂などの異物が入り込んだ創
 - ・動物咬傷
4. 本品を創内部に充填、又は留置しないこと。
5. 本品を使用中に皮膚障害と思われる症状が現れた場合には、使用を中止し適切な治療を行うこと。
6. 眼の周囲、口腔内などの粘膜器官には使用しないこと。

不具合・有害事象

1. 創の感染症状(疼痛、発赤、腫れ、発熱)
2. 創傷及び周囲の皮膚障害(表皮剥離、浸軟、浮腫、水疱、発赤、びらん、そう痒、アレルギー、接触性皮炎)
3. 固着
4. 壊死組織の増加
5. 疼痛

その他の注意

1. 本品の開封前に包装袋が破損又は汚損している場合は使用しないこと。
2. 本品開封後は使用期限にかかわらずできるだけ早く使用すること。
3. 開封後は包装袋を密閉し、清潔に保管すること。
4. 開封後保管中に、変色、剥離等が認められる場合は、本品の使用を中止すること。
5. 本品は未滅菌である。

【保管方法及び使用期間等】

保管方法

直射日光・高温多湿を避け、室温にて保管のこと。

有効期間

使用期限:製品包装に記載(自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社瑞光メディカル
〒566-0062
大阪府摂津市鳥飼上四丁目3番50号

【お問い合わせ先】

株式会社瑞光メディカル
電話:072-653-8877(平日 8:30~16:45)
E-mail: plus_moist@zuiko.co.jp