

ボリュームパック

# 救急ばんプラスモイスト<sup>®</sup>業務用


## 商品特長

- 1) プラスモイストの独自機能である“浸出液のコントロール機能”を有した救急ばんそうこうです。
- 2) 適度な湿潤状態に整えることで傷口の乾燥を防ぎ、治癒までやさしく保護します。
- 3) 傷口の乾燥や痂皮(かさぶた)形成による固着を防ぐので、交換時の痛みも少なく快適です。
- 4) 傷口から出る過剰な浸出液を吸収し、傷口以外の皮膚が「ムれる」、「ふやける」、「カブれる」等の皮膚トラブルが生じにくい構造です。
- 5) テープ部は、水に強いはっ水仕様で、伸縮性と柔軟性に富む通気性素材を採用しており、ムレずにフィットします。

## 商品イメージ




【パッケージ】

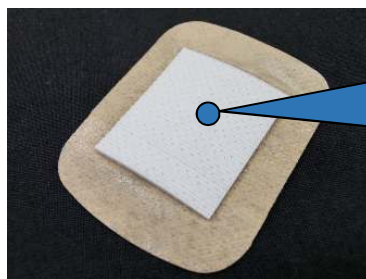

【本体】

吸収パッド部に  
プラスモイストを採用！

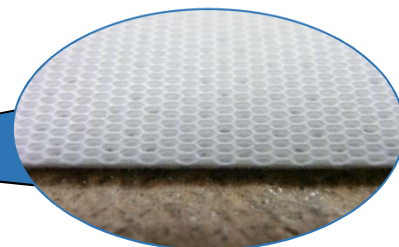

【表面拡大写真】

## 使用方法

- 1) 傷口を水道水等でよく洗い水気をふき取った後、本品のパッド部を傷口に当て、テープをしっかり押さえて貼ってください。最初は、つきにくく感じるがありますが、すぐに皮膚になじんでフィットします。
- 2) はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿って、ゆっくりはがしてください。皮膚は排泄器官であり、一日一回の交換をお勧めします。



「救急ばんプラスモイスト 業務用」

固定材いらずで  
小さな創傷にも  
非常に便利です！

## 商品明細

商品名	タイプ (製品番号)	サイズ (mm)	入数 (1箱)	定価 (税抜)	JANコード
救急ばんプラスモイスト 業務用	ふつう (KAMJ)	25 × 72 (パッド部13 × 22)	100枚	4,000円	4571256950358
	ビッグ (KALK)	50 × 60 (パッド部30 × 35)	60枚	4,000円	4571256950365

販売名：プラスモイストK 一般的名称：救急絆創膏(JMDNコード：34864000) 医療機器製造販売届出番号：27B2X00217PMKA00

## 【製造販売元】

株式会社瑞光メディカル

〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上4-3-50

E-mail: plus\_moist@zuiko.co.jp

Tel: 072-653-8877 FAX: 072-653-8876

