

## ニュース・リリース

お得意先各位

2014年9月4日  
株式会社瑞光メディカル

「救急ばんプラスモイスト 業務用」を9月10日より新発売  
～プラスモイストを吸収パッドに用いた救急ばんそうこうが創傷治療の様々なニーズに応えます～

株式会社瑞光の子会社である株式会社瑞光メディカル(本社:大阪府摂津市、代表取締役社長:和田昇)は、新鮮外傷や熱傷、また、褥瘡や皮膚潰瘍などの被覆・保護材としてご好評いただいておりますプラスモイスト®シリーズの商品ラインナップに、予てより多くのご要望頂いておりました救急ばんそうこうタイプを新たに加え、商品名「救急ばんプラスモイスト 業務用」として、2014年9月10日より販売開始いたします。

### ◆「救急ばんプラスモイスト 業務用」の開発背景と商品概要

近年、創傷治療では湿潤療法(モイストヒーリング)の考え方に沿った種々のドレッシング材が使われていますが、瑞光メディカルでは、逸早くこれら市場のニーズに応えるべく、2007年よりプラスモイスト®シリーズの上市を順次行い、熱傷や新鮮外傷、皮膚潰瘍等々の保護材として数多くの実績を上げてまいりました。

一方、当該プラスモイスト®シリーズは、ハサミで自由な形状・サイズにカットできる特長を有し、様々な形状の創傷面に適用し易いことから、医療現場で高いご評価を頂いておりますが、一方で、固定にはサージカルテープや包帯等が必要であり、プラスモイスト®シリーズの商品バリエーションに固定材と一体化したタイプを望む声も多数頂いておりました。

そこでこの度、瑞光メディカルでは、救急ばんそうこうの吸収パッド部に、プラスモイストの透過層、吸収層をそのまま適用することで、プラスモイストが有する優れた非固着性や浸出液コントロール機能を有し、かつ、簡便に素早く創傷面を被覆できる救急ばんそうこう(商品名:「救急ばんプラスモイスト 業務用」)の開発を行いました。

また、当該「救急ばんプラスモイスト 業務用」は、医療施設や介護施設、学校保健室等をメインターゲットとしており、1箱に多枚数を入れたボリュームパックと致しました。

## ◆商品明細

【一般医療機器】

商品名	タイプ (製品番号)	サイズ(mm)	入数(1箱)	仕様	定価[税抜]	JANコード
救急ばんプラスモイスト 業務用	ふつうサイズ ( KAMJ )	25×72 (パッド部 13×22)	100 枚	箱入 [滅菌済み]	4,000 円	4571256950358
	ビッグサイズ ( KALK )	50×60 (パッド部 30×35)	60 枚		4,000 円	4571256950365


販売名: プラスモイストK

一般的名称: 救急絆創膏(JMDNコード:34864000), 医療機器製造販売届出番号: 27B2X00217PMKA00

## ◆商品イメージ




【パッケージ】

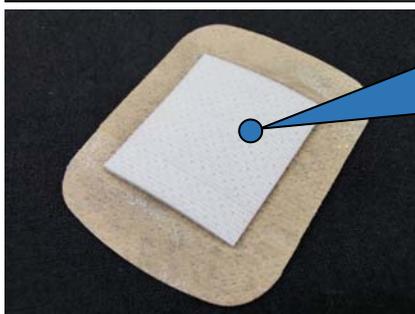

【本体】

吸収パッド部に  
プラスモイストを採用!

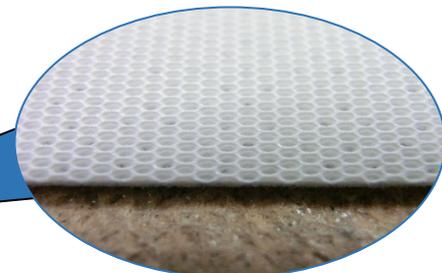

【表面拡大写真】

## ◆「救急ばんプラスモイスト 業務用」の特長

- プラスモイストの独自機能である“浸出液コントロール機能”を有した救急ばんそうこうです。
- 適度な湿潤状態に整えることで傷口の乾燥を防ぎ、治癒までやさしく保護します。
- 傷口の乾燥や痂皮(かさぶた)形成による固着を防ぐので、交換時の痛みも少なく快適です。
- 傷口から出る過剰な浸出液を吸収し、傷口以外の皮膚が「ムれる」、「ふやける」、「カブれる」等の皮膚トラブルが生じにくい構造です。
- テープ部は、水に強いはっ水仕様で、伸縮性と柔軟性に富む通気性素材を採用しており、ムレずにフィットします。

## ◆使用方法

- 傷口を水道水等でよく洗い水気をふき取った後、本品のパッド部を傷口に当て、テープをしっかり押さえて貼ってください。最初は、つきにくく感じるがありますが、すぐに皮膚になじんでフィットします。
- はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿って、ゆっくりはがしてください。
- 皮膚は排泄器官でもあり、一日一回の交換をお勧めします。

## 使用イメージ



- 「救急ばんプラスモイスト 業務用」は、今までプラスモイストでは固定処置の面倒だった小さな創傷にも便利です。

### ◆製造販売元

株式会社瑞光メディカル

### 【ニュース・リリースに関するお問合せ】

株式会社瑞光メディカル 販売管理部 広報担当：清水

メールアドレス： [plus\\_moist@zuiko.co.jp](mailto:plus_moist@zuiko.co.jp)

TEL： 072-653-8877 FAX： 072-653-8876