

大きめロール  
10cm幅×40cm巻

～ 肌にやさしく、はがす時に痛くない新設計ハイドロコロイド素材 採用～

# ズイコウ ハイドロコロイド包帯

肌にぴったりフィット

吸収するのでムレにくい

半透明で目立ちにくい

## 商品特長

- 1) 肌にやさしく、はがす時に痛くないハイドロコロイド素材を新採用しています。
- 2) 従来のポリウレタンフィルムとは異なり、適度な吸収力を持ち、ムレにくいです。
- 3) 柔らかくシワになりにくいので、貼りやすいです。
- 4) 薄いのでかさばらず、貼った部分が半透明で目立ちにくいです。
- 5) 従来にはなかった大きめロール形状のハイドロコロイド素材であり、応用範囲も広く、様々なニーズにお応えします。
- 6) 安価な上、使う大きさに合わせてハサミで切れるので非常に経済的です。

## 商品イメージ



外観




本体



ハサミで切ることが可能


## 使用方法

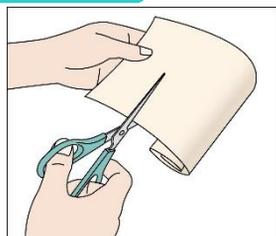

①使用用途に応じたサイズにカットします。



②白い離型紙をはがし、キズあてパッドなどの上から粘着面を貼り付けます。

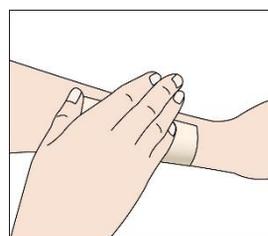

③本品を貼り付けた後、確実に粘着するよう、手のひらで約1分間押さえて温めてください。

## 商品明細

商品名（製品番号）	サイズ	入数	定価	JANコード
ズイコウ ハイドロコロイド包帯（HCARR）	10cm幅×40cm巻	1本／袋	オープン価格	4571256950273

<素材> 本体：ポリウレタン、ハイドロコロイド  
離型紙：紙

【製造元】

株式会社瑞光メディカル

〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上4-3-50

E-mail: plus\_moist@zui.co.jp

Tel: 072-653-8877 FAX: 072-653-8876

**ZUIKO**  
MEDICAL  
ZUIKO MEDICAL CORPORATION