

浸出液を吸収し白く膨らんで傷を保護

ハイドロール

大きめロール
10cm幅×40cm巻



(本体)ポリウレタン、ハイドロコロイド
(剥離紙)紙、シリコーン樹脂

特徴

- 切って使えるハイドロコロイド材です。
- 浸出液を吸収し、白く膨らんで傷を保護します。
- 吸収するのでムシにくく、また肌にやさしいため、はがす時に痛くありません。
- 薄いのでかさばらず、貼った部分が半透明で目立ちにくいです。
- 従来には無かった大き目ロール形状のハイドロコロイド素材であり、応用範囲も広く、様々なニーズに応えます。

効能・効果

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等

用法・用量

傷口を水道水等でよく洗い、水気をふき取ってください。本品を傷口よりもひと回り大きく清潔なはさみ等でカットし、剥離紙をはがし、傷口に直接貼り付けて密着させます。本品を貼り付けた後、確実に粘着するよう、手のひらで約1分間押さえて温めてください。長時間貼付せず、少なくとも1日1回交換してください。

販売名: プラスモイストHC

一般医療機器 救急絆創膏34864000 届出番号:27B2X00217PMHC00

ヒューマンベース ハイドロール	希望小売価格	JANコード	ITFコード
■内容量/10×40cm 1ロール/袋 ■包装単位/中箱 10袋 外箱 6中箱/60袋	オープン	 4 987373 076015	 149 87373 07601 2

製造販売元及び製造元

株式会社 瑞光メディカル

発売元・お問い合わせ先

テイコクファルマケア
株式会社

〒769-2695 香川県東かがわ市三本松567番地
☎0879-25-7771 / 9:00~17:00(土日祝日を除く)

www.teikoku-pc.co.jp

ハイドロール

救急箱にコレ1本!!



大きな傷にも
小さな傷にも 切って使える! ハイドロコロイド材



切り傷



マメ



すり傷




くつずれ



ハサミで切ることが可能

使用方法

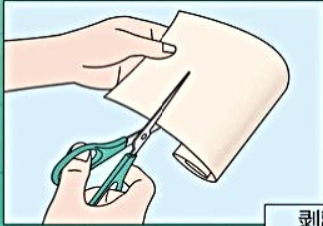

① 剥離紙をはがし、傷口に直接貼り付けて密着させる。




② 本品を傷口よりもひと回り大きく清潔なはさみ等でカットする。



③ 本品を貼り付けた後、確実に粘着するように手のひらで約1分間押さえて温める。


カット例

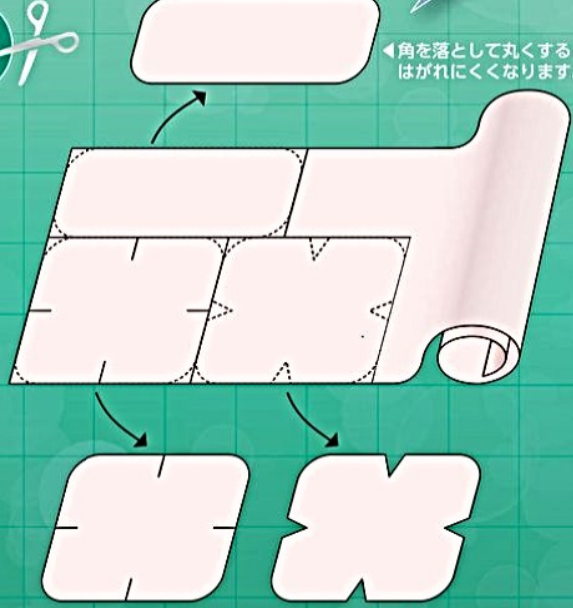

◀角を落として丸くするとはがれにくくなります。


▲切り込みを入れると湾曲部にフィットしやすくなります。

ハイドロールの吸収速度

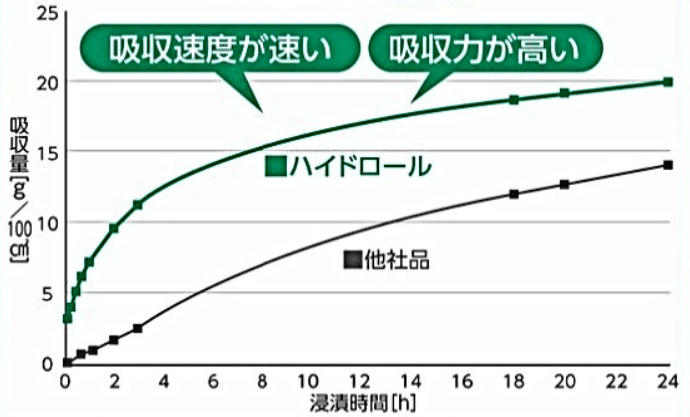

吸収速度が速い 吸収力が高い

ハイドロールのUVカット効果

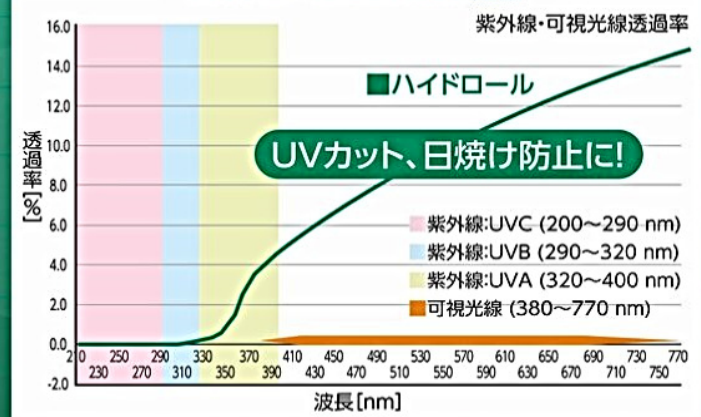

UVカット、日焼け防止に!

※UVBを100%遮蔽します...UVBは傷跡の色素沈着の主な要因です。