

\*2014年9月10日(第2版)  
2014年2月21日(第1版)

類別: 医 04 整形用品  
一般医療機器 救急絆創膏(JMDNコード:34864000)

## プラスモイストK

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】 再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1.形状・構造

粘着テープに多層構造のシート材からなるパッドがついています。パッドは、傷口接触面である透過層、吸水性能を有する吸収層の2層からなり、更に、透過層は、メッシュシートと透過性シートで構成されています。パッドと粘着テープを覆う形で剥離紙が付加されています。

##### 2.材質

パッド: ポリエチレン、ポリプロピレン、セルロース等  
粘着テープ: ウレタン不織布、シリコン・アクリル粘着剤  
剥離紙: 紙、シリコン樹脂

##### 3.原理

パッドが傷口を覆い、保護します。パッドの傷口接触面となるメッシュシートは、全面に微細孔を有したセル構造をしており、傷口の乾燥やかさぶた形成の結果生じる本品と傷口との固着を防ぎます。また、過剰な浸出液(傷口から出る体液)等が生じる場合は吸収層で吸収し、正常な皮膚部での、浸出液によるふやけ等の皮膚障害を生じにくくします。

撥水性のある粘着テープは、パッドを傷口にしっかり固定し、また、皮膚から発散する水分を透過させるため、正常な皮膚がムレにくくなります。

パッドと粘着テープの粘着面を保護するため剥離紙がついていますが、使用時には容易にはがすことができます。

#### 【使用目的、効能又は効果】

傷の被覆及び保護

#### 【品目仕様等】

##### 1.無菌性

無菌性保証水準:  $10^{-6}$

#### 【操作方法又は使用方法等】

一度使用したものは再度使用しないでください。

傷口を水道水等でよく洗い、水気をふき取った後、パッドを傷口に当て、粘着テープをしっかり押さえて貼ってください。

最初つきにくく感じるがありますが、すぐに皮膚になじんでフィットします。

はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿って、ゆっくりはがしてください。

#### 【使用上の注意】

##### 1.次の方は、使用前に必ず医師に相談してください。

- ・糖尿病や血行障害の治療を受けている方
- ・感染を起こす可能性のある傷(低温やけど、深い傷、動物などに咬まれた傷、ガラス・木片・砂などの異物が入っている傷)に使う方

##### 2.次のところには使用しないでください。

- ・感染した傷(傷口の周囲が赤い、熱・はれがある、ズキ

ズキした痛みが続く)

- ・膿をもつ等の異常がある傷
  - ・にきびやとびひ等の皮膚感染
  - ・眼の周囲、粘膜
- 3.本品の使用により、強い痛み、傷口の周囲が赤くはれる、発疹、かゆみ等が生じた場合は使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。
  - 4.消毒液を使用した場合は、水道水等で十分に洗い流してください。
  - 5.パッドサイズより大きな傷には使用しないでください。
  - 6.粘着面を傷口に貼らないでください。
  - 7.浸出液がもれた場合は、新しいものに貼り替えてください。
  - 8.長時間貼付せず、少なくとも1日1回交換してください。
  - 9.個包装が破れたり、開けられたものは使用しないでください。

#### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

##### 貯蔵・保管方法

直射日光を避け、なるべく湿気の少ない、小児の手の届かないところに保管してください。

##### 使用期間

使用期限: 製品包装に記載(自己認証による)

#### \*【包装】

製品名	サイズ(mm)	
	パッド	テープ
ふつうサイズ	13×22	25×72
ビッグサイズ	30×35	50×60

#### 【製造販売元及び製造元の氏名又は名称及び住所等】

##### 製造販売業者

株式会社瑞光メディカル

〒566-0062

大阪府摂津市鳥飼上4丁目3番50号

##### 製造業者

ピアック株式会社

#### 【お問い合わせ先】

株式会社瑞光メディカル

電話: 072-653-8877

(8:30~16:45 土・日・祝日を除く)