

この添付文書をよく読みご使用ください。また必要な時に読めるように大切に保管してください。

2020年1月作成(第1版)

届出番号:27B2X00217PMHC00

# plus **+** moist. **ハイドロコロイド包帯 アドバンス**

類別:医04 整形用品 一般医療機器 救急絆創膏(JMDNコード:34864000)  
販売名「プラスモイストHC」

再使用禁止

**【禁忌・禁止】** 一度使ったものは再使用しないでください。  
感染がみられる傷には使用しないでください。

## 【形状・構造及び原理等】

### 1.形状・構造



本品は、ポリウレタンフィルムの支持体に、絆創膏材として粘着性をもったハイドロコロイドをラミネートしたものと剥離紙からなります。

### 2.材質

絆創膏材:ハイドロコロイド 支持体:ポリウレタン 剥離紙:紙、シリコーン樹脂

### 3.原理

本品全体を傷口にあてて貼付することで、傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等を行います。絆創膏材の粘着面を保護するために剥離紙がついています。

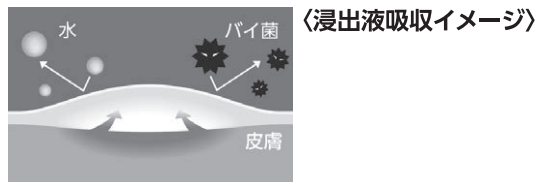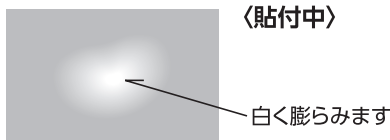

### 4.サイズ 10cm×40cm

## 【使用目的又は効果】

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等

## 【使用上の注意】

1.次のところには使用しないでください。

- ・感染した傷(ズキズキした痛みが続く、傷口の周囲が赤い、熱・はれがある)
- ・感染を起こす可能性のある傷(低温やけど、深い傷、動物などにかまれた傷、ガラス・木片・砂などの異物が入っている傷)
- ・壊死組織がある傷
- ・膿をもつ等の異常がある傷
- ・にきびやとびひ等の皮膚感染
- ・目の周囲、粘膜
- ・成因不明の傷
- ・かさぶたがすでにできている傷

2.糖尿病や血行障害の治療を受けている方は、使用前に必ず医師に相談してください。

3.本品の使用により、ズキズキした痛みが続く、傷口の周囲が赤い、熱・はれがある、発疹、かゆみ等が生じた場合は使用を中止し、医師の診察を受け、適切な治療を受けてください。

4.本品を使用中に浸出液による浸軟(ふやけ)を起こす場合があります。また、特に皮膚が弱い方は皮膚障害や皮膚剥離を起こすことがあり、本品の使用時には十分な観察を行い、このような症状が認められた場合には直ちに使用を中止し、医師の診察を受け、適切な治療を受けてください。

5.傷口の観察を十分に行い、使用後すぐに浸出液がもれ出す場合は本品を使用しないでください。

6.消毒液、脱色剤、有機溶剤、また、軟膏、クリーム、オイル等の薬剤と併用しないでください。

7.本品は水に濡らすと周囲にヌメリが生じる場合があります。本品が濡れた場合は、上からヌメリとともに水分をよくふき取ってください。

8.本品は外用ですので、内服しないでください。また、誤飲には十分注意してご使用ください。

9.開封後は包装袋を密閉し、保管してください。また、本品開封後は使用期限にかかわらずできるだけ早く使用してください。


10.本品は未滅菌です。

## 取扱説明書

### 【使用方法等】


一度使ったものは再使用しないでください。

1. 傷口を水道水等でよく洗い、汚れや異物を取り除き、水気をふき取ってください。また、消毒液を用いた場合は消毒液が残らないように水道水等で十分に洗い流してください。(本品交換時にも必ずこの処置を行ってください。)

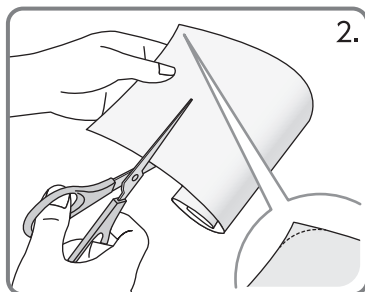

2.


2. 本品を包装袋から取り出し、清潔なはさみ等で傷口よりもひと回り大きなサイズにカットしてください。角を落とすように丸くカットすることで、はがれにくくなります。

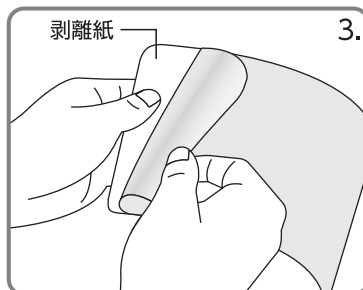

剥離紙

3.

3. 剥離紙をはがし、傷口に直接貼り付けて密着させてください。

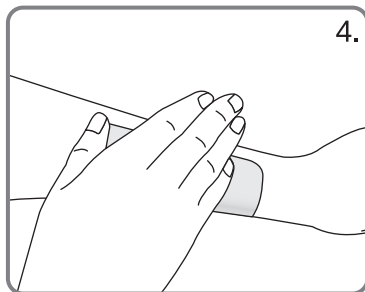

4.

4. 本品を貼り付けた後、確実に粘着するよう、手のひらで約1分間押さえて温めてください。

5. 浸出液がもれたり、絆創膏材の傷口接触部位が汚れたりはがれたりした場合は、そのまま貼り続けずに本品をはがし、傷口を水道水等でよく洗ってください。洗浄後、水気をふき取り、新しいものに貼り替えてください。また、長時間貼り付けせず、少なくとも1日1回交換してください。

6. 本品をはがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿って、ゆっくりはがしてください。なお、本品がはがれにくい場合は、温水にしばらくつけるか、オイル(オリーブオイル、ゴマ油等)または市販のリムーバを使うとはがしやすくなります。

7. 本品をはがした後、粘着剤が皮膚に付着した場合は、市販リムーバ、または温水でふき取ってください。

8. 本品を新しいものに貼り替える時に、ズキズキした痛みが続く、傷口の周囲が赤い、熱・はれがある、膿がある等のいずれかの場合は感染の疑いがあります。感染の症状が認められた場合は本品の使用を中止し、医師の診察を受け、適切な治療を受けてください。一方、当該感染の症状が認められない場合、本品交換時の独特のにおいと黄色いゲルは膿ではありません。ゲルは本品が浸出液を吸収したものであり、水道水等で洗い流してください。

### 【保管方法及び有効期間等】

保管方法

直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しいところに保管してください。

有効期間

使用期限：製品包装に記載(自己認証による)

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社瑞光メディカル 〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上四丁目3番50号

お客様相談室 072-653-8877 / 8:30~16:45(土・日・祝日を除く)

<http://www.zuiko-medical.co.jp/>